
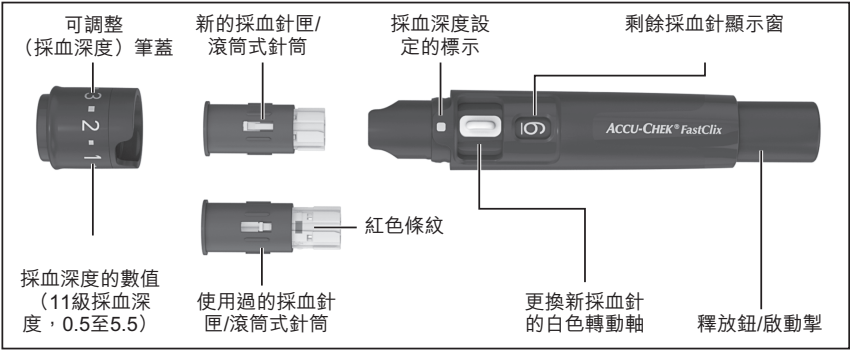
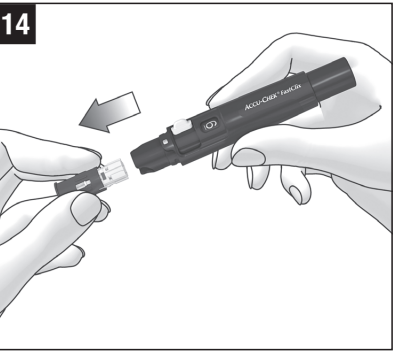
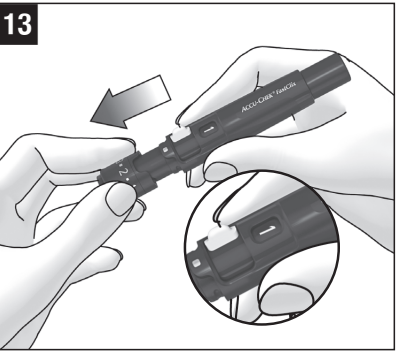
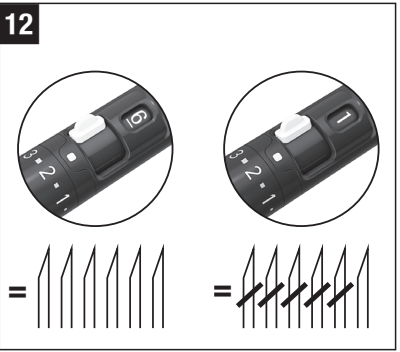
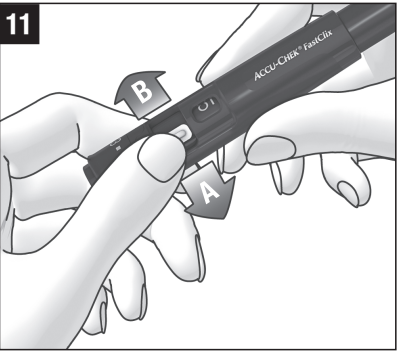
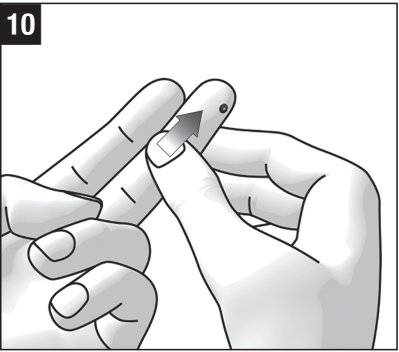
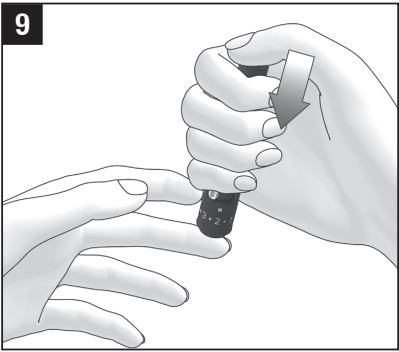
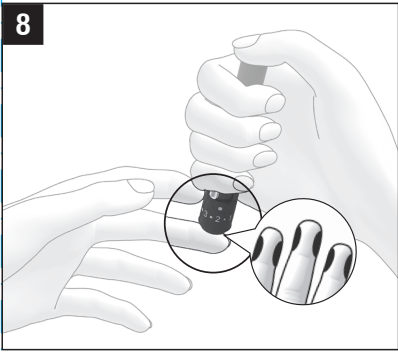
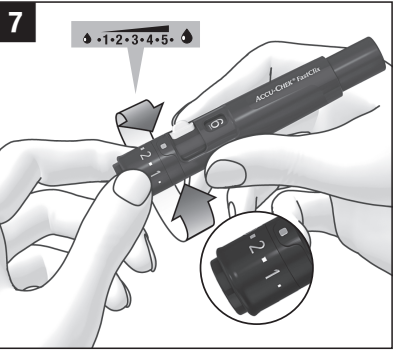
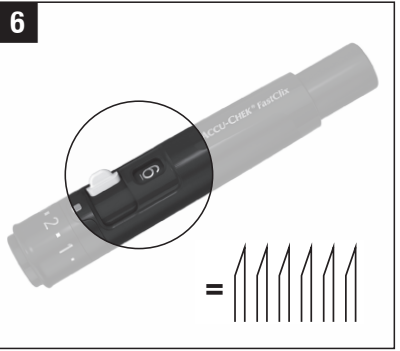
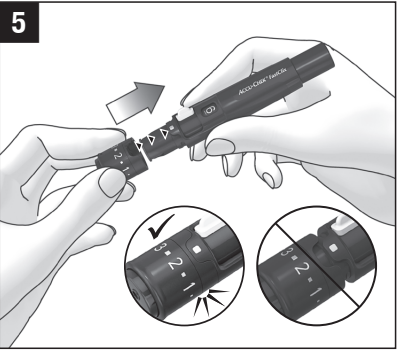
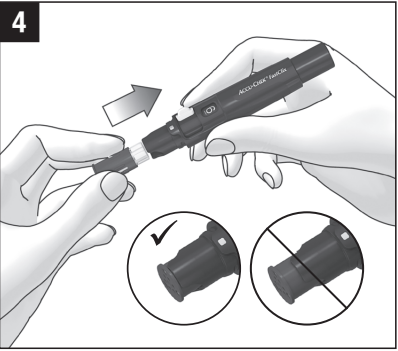
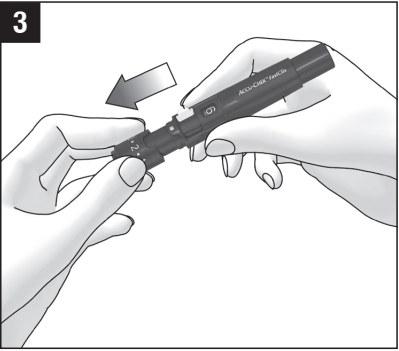


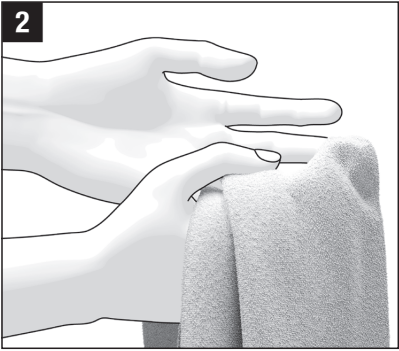

可能無法在每次更換新的採血針時，進行採血。此時，您只需更換下一支採血針即可。只能將羅氏速讀/易極採血針匣/滾筒式針筒套入羅氏速讀/易極採血筆內。其他採血針或者採血針匣/滾筒式針筒可能損害採血筆的操作，或者造成永久損壞。

技巧和訣竅

您必須將採血針匣/滾筒式針筒完全套入採血筆內。只有這樣，筆蓋才能正確套在採血筆上。當只有採血針匣/滾筒式針筒的前緣從採血筆前端突出時，才算正確套入。當您將筆蓋推到底時，筆蓋即正確套在採血筆上。您必須聽到並感覺到筆蓋卡入定位。請勿用力套上筆蓋。過度用力會導致筆蓋和採血筆受損。筆蓋蓋不上時應該調整採血針匣/滾筒式針筒的位置。

將採血針匣/滾筒式針筒推入採血筆內時，不得同時按下釋放鈕/啟動擊。將採血針匣/滾筒式針筒推入採血筆內時，不得同時使用釋放鈕/啟動擊來支撐採血筆，例如放在桌面上支撐。這可能會令採血針彈出，並可能意外扎傷您。

所有6支採血針尚未用完前，請勿將採血針匣/滾筒式針筒從採血筆上取出。取出後您將不能重新將採血針匣/滾筒式針筒套入採血筆。

當您按下釋放鈕/啟動擊時，採血筆會釋放採血針。您無需事先讓採血筆上膛/上針。如果您沒有使用此採血筆的經驗，請從數字較小的採血深度開始，比如「2」。

一般來說可從每一隻手指採血。有些手指可能不適合，例如皮膚或指甲發炎的手指。請於指尖側面採集微血管血液，因為這裡的疼痛感最弱。

如果滲出的血量不足，下次採血時可增加採血筆壓在皮膚上的力道。如果血量還是不夠，請逐步增加採血深度。如果滲出太多的血，可以減少採血深度。

使用採血針匣/滾筒式針筒

警告

感染風險

- 如果採血針已被使用，則可能傳播感染。採血針在採集血液時請僅使用一次。
- 如果採血針匣/滾筒式針筒已損壞，將無法保證採血針於無菌狀態，進而會導致感染。目測檢查採血針匣/滾筒式針筒。如果採血針匣/滾筒式針筒已變形、出現裂縫或有其他形式的損壞，請勿使用。請丟棄採血針匣/滾筒式針筒。
- 在極少數情況下，採集了血液之後採血針沒有回到採血筆內。
- 進行清潔時只使用水，進行消毒時只使用濃度為70%的異丙醇（火酒）。

一邊。將採血筆保存於他人接觸不到的地方，並聯絡羅氏糖尿病照護部門/客戶服務部。

預防措施

感染風險

- 未清潔的採血部位可能導致感染。採集血液之前，清潔採血部位。
- 如果採血針匣/滾筒式針筒的保存期限已過，採血針將無法保證無菌。

請僅使用在保存期限內的採血針匣/滾筒式針筒。保存期限列印於包裝上的E符號旁邊。

請遵照示意圖顯示的說明進行操作。採血之後，請務必立刻按照血糖機使用者手冊檢測您的血糖。

操作條件

在下面的操作條件使用採血筆（包含其零件）：

- 溫度範圍：+5至+45 °C
- 相對濕度範圍：5至90 %

採血筆和採血針匣/滾筒式針筒的存放

請勿在極端的溫度下（如在熱的車內）存放採血筆和採血針匣/滾筒式針筒。這可能損害採血筆和採血針匣/滾筒式針筒的操作。

採血筆和筆蓋的清潔和消毒

預防措施

感染風險

如果採血筆或筆蓋已與血液接觸，則可能傳播感染。

在其他人使用採血筆和筆蓋（例如為了幫您採血）之前，請每次都對其進行清潔與消毒。

為了預防傳播感染，務必定期對採血筆和筆蓋進行清潔和消毒：

- 至少每週一次，
- 有血跡殘留在採血筆或筆蓋上時，
- 每次在其他人使用採血筆之前（例如為了幫您採血）。

您需要使用3塊無棉絮/絨毛的布、水和70 %的異丙醇（火酒）。用於消毒的布必須足夠大，以便將採血筆包裹住。

在消毒採血筆和筆蓋之前，請先進行清潔，去除血液和其他污垢。

為避免損壞採血筆和筆蓋：

- 請勿將採血筆和筆蓋浸入液體中。
- 進行清潔時只使用水，進行消毒時只使用濃度為70%的異丙醇（火酒）。

最近更新日期

2022-05

糖尿病照護部門/客戶服務部

台灣製造業者名稱：Roche Diabetes Care GmbH
製造業者地址：Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim, Germany
醫療器材商名稱：台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司
醫療器材商地址：台北市中山區民權東路三段2號10樓
免付費專線：0800-060-333
www.accu-chek.com.tw
衛署醫器輸壹字第011935號
衛署醫器輸壹字第011936號

丟棄使用過的採血針匣/滾筒式針筒

如果您所在的國家/地區沒有其他規定，用過的採血針匣/滾筒式針筒可當作一般家用垃圾丟棄。

丟棄採血筆

預防措施

感染風險

如果採血筆已與血液接觸，則可能傳播感染。請依照您所任在國家/地區的規定，將使用過的採血筆作為感染性材料丟棄。

未使用的採血筆作為塑膠廢棄物丟棄。關於正確丟棄採血筆的規定的資訊，請向當地相關部門或機構查詢。

其他採血部位

您不僅可以從指尖採集微血管血液來進行血糖檢測，還可以從其他部位採集（手掌、前臂、上臂、小腿肚和大腿），就是所謂的其他部位採血檢測法（英文：Alternative Site Testing，簡寫：AST）。從其他部位採集微血管血液，不能使用普通筆蓋，必須使用一種專用筆蓋，即羅氏速讀/易極AST筆蓋。

訂購資訊

如果您想訂購羅氏速讀/易極採血筆、羅氏速讀/易極採血針匣/滾筒式針筒或羅氏速讀/易極AST筆蓋，請聯絡羅氏糖尿病照護部門/客戶服務部（參閱糖尿病照護部門/客戶服務部一節）。

嚴重事件通報

對於歐盟內的患者/使用者/第三方以及具有完全相同監管制度的國家；如果在使用本器材期間或由於其使用發生了嚴重事件，請將其通報到製造業者和您的國家機關。

ZHT 使用說明

先閱讀使用說明之後再從指尖處採集血液。

效能/預定用途

採血筆

使用Accu-Chek FastClix（羅氏速讀/易極）採血筆從指尖採取微血管血液，簡單方便且不易疼痛。羅氏速讀/易極採血筆僅供單獨個人使用！只能用於採集同一個人的血。如果多人共用採血筆，即使是同一家人，或是如果專業人員/醫護人員在不同人身上使用同一採血筆，都會有造成傳播感染的危險。因此，本採血筆不適用於在公共醫療衛生機構進行專業應用。採血筆並非無菌產品。在糖尿病血糖自我監控方面的人視為目標群組。

採血針

六支羅氏速讀/易極採血針放置於一個採血針匣/滾筒式針筒中。採血針匣/滾筒式針筒適用於與羅氏速讀/易極採血筆配合使用。採血針匣/滾筒式針筒是一次性零件。裏面的每支採血針僅供單次使用。羅氏速讀/易極採血針匣/滾筒式針筒內含6支採血針，適用於與羅氏速讀/易極採血筆配合使用，供您以簡單方便且不易疼痛的方式採集微血管血液。採血針匣/滾筒式針筒是一次性物品，內含6支採血針僅供單次使用。每支採血針備有保護蓋，保證直到第一次使用時採血針都處於無菌狀態。採血針都經由放射線消毒。使用過的採血針匣/滾筒式針筒可防止再次使用。

一般安全性資訊

本使用說明包含警告和預防措施：警告表示可預見的嚴重危險。預防措施說明為了安全且有效地使用產品或防止損壞產品而應採取的措施。

警告

室息的风险
本產品內含可能被吞下的小物品。

請將小物品放置在遠離可能吞下小物品的幼童和成人之處。

受傷的風險
如果採血深度過深，可能會導致兒童受傷。

首次於兒童身上使用採血筆前，請諮詢您的專業人員/醫護人員。請從最淺的採血深度開始。

感染風險
如果採血筆或採血針匣/滾筒式針筒已與血液接觸，則可能傳播感染。

採血筆和採血針匣/滾筒式針筒不得被他人使用，即使是同一家人。專業人員/醫護人員不得使用採血筆從不同人士身上採集血液。

如果採血筆或者採血針匣/滾筒式針筒跌落到地上，或者遭受其他機械負荷時，請檢查是否有損壞，如裂縫。如果採血筆或者採血針匣/滾筒式針筒已損壞，或者如果採血針從採血針匣/滾筒式針筒露出，請勿繼續使用採血筆或者採血針匣/滾筒式針筒。

預防措施

受傷的風險

- 皮膚與採血筆、採血針匣/滾筒式針筒或者採血針的接觸可能會刺激皮膚。
- 如果您的皮膚受到刺激或發炎，請諮詢您的專業人員/醫護人員。
- 如果將採血針刺入堅硬表面而非刺入皮膚，針頭可能會損壞。
- 僅使用採血針採集血液。
- 採血筆的零件（如釋放鈕/啟動擊）可能會在使用期間彈起。
- 請勿將採血筆指向您的臉部或者其他入。

如果您發現採血針散落在包裝內，請勿使用。請丟棄它們。您可以使用包裝內的所有採血針匣/滾筒式針筒。如果您碰巧套入了一個缺少採血針的採血針匣/滾筒式針筒，您

ZHT Accu-Chek® FastClix

採血筆和採血針

Frontside

TW011935-202402

	參閱使用說明或電子版使用說明
	注意，務必參閱本產品隨附的使用說明裡有關安全方面的備註說明。
	保存期限
	使用放射線消毒
	不可重複使用
	單一患者 — 多次使用
	清洗雙手
	製造日期
	醫療器材
	製造業者
	醫療器材單一識別系統
	物料型號
	批號
	符合適用的歐盟法規的規定

CE 0123

Accu-Chek和FASTCLIX是Roche（羅氏）的商標。

© 2022 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

